

मेड.एल

MED<sup>EL</sup>

एक वाद्य बजाना



hearLIFE

  
BRIDGE  
to better communication



क्या आपने कभी किसी वाद्य को बजाया है? अगर हां तो इसका अनुभव करें तथा देखें कि आपके कॉविलियर इम्प्लान्ट के साथ इसकी आवाज कैसी आती है? आपको संगीत का आनंद लेने के लिए एक पेशेवर होने की जरूरत नहीं है तथा यह आपको यह सूचना दे सकता है जो आपको एक बेहतर संगीत सुनने वाला बनाएगी। अगर आप कोई वाद्य नहीं बजाते हैं तो आप ताली बजाने का या किसी गाने की धुन पर थाप देने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई दोस्त कोई वाद्य बजाता है तो देखें कि वे आपके लिए कुछ आसान सी धुन बजाएं। अगर आप यह जानते हैं कि क्या बजाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है तो यह भविष्य में आपको बेहतर सुनने में मदद करेगी।

**मुझे यह पसंद नहीं**

यह उम्मीद न करें कि आप जो भी सुनेंगे आपको वह पसंद आएगा ही और खास तौर पर तब जब आप संगीत को नियमित रूप से सुन रहे हैं। हम सभी में संगीत की कुछ पसंदें तथा कुछ नापसंदें होती हैं और यह उम्मीद करना गलत है कि हर सुनाई पड़ने वाला संगीत अच्छा ही होगा। वह संगीत सुने जो आप सुनना चाहते हैं तथा इसे सुनें तथा इसके बाद धीरे धीरे सुनने की सीमा को बढ़ाएं। इसमें समय तो लगेगा लेकिन इसका प्रयास किया जा सकता है।

**अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास!**

बेहतर तरीके से संगीत सुनने के लिए अभ्यास ही अत्यंत आवश्यक होता है। जितना ज्यादा आप संगीत सुनने का अभ्यास करेंगे, यह उतनी ही बेहतर ध्वनि देगा। ध्यान देना तथा अभ्यास करना बेहतर सुनने की कुंजी है।

**कुछ बेहतर संगीत स्रोत**

नॉइज़ कौंशिया स्कॉट रचनाकार ऑलिव सर्ले द्वारा रचित एक सीडी तथा डीवीडी सेट है जो कि कॉविलियर इम्प्लान्ट उपयोग करने वालों के लिए लिखे गए संगीत को प्रदर्शित करता है (वर्तमान अनुसंधान पर आधारित)। अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय मेड-फ्ल प्रतिनिधि से संपर्क करें।

कॉविलियर इम्प्लान्ट को लगाने के बाद अपने संगीतमय अनुभवों पर बहुत ही रोचक लेखों कॉविलियर इम्प्लान्ट के साथ संगीत सुनना की श्रृंखलाओं में मार्क रोज ने अपने अनुभवों को साझा किया है। भाग १ - ४ <http://www.hearinglossweb.com/tech/ci/music/ross.htm> में पाए जा सकते हैं।



## परिचय

पिछले ३० सालों से कॉविलयर इम्प्लॉट के निरंतर विकास का अर्थ है कि वे कई लोग जो जन्म से ही सुन नहीं सकते थे वे अब अपेक्षाकृत आसानी से बातों को समझने लगे हैं। कॉविलयर इम्प्लॉट के साथ अधिकतर वयस्क अब आमने सामने, समूहों में तथा यहां तक कि फोन पर भी बातों को समझने लगे हैं। कॉविलयर इम्प्लॉट के साथ अधिकतर वयस्क उपयोगकर्ता अब आवाजों को पहचानने लगे हैं तथा वे उनके प्रति सहज भी बने रहते हैं, लेकिन कईयों के लिए चिंता का एक और विषय है कि संगीत उनके लिए उतना मधुर नहीं होता क्योंकि वह उन्हें समझ में नहीं आता है। यह विज्ञापन प्स्तिका आपकी मदद के लिए बनाई गई है, कॉविलयर इम्प्लॉट के अधिकतर उपयोगकर्ता संगीत सुनने का आनंद उठा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है या न ही कोई ऐसे कठिन नियम जिनका पालन न किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसे सुझाव जरूर हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं।

## परिचित धुन के साथ शुरु करें

क्या आप उस गाने के बारे में सोच सकते हैं जो आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं? एक ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छी तरह आता हो 'जो आप अपने दिमाग में सुन सकें', यदि आप रुकते हैं तथा ध्यान देते हैं? हमारी किशोरवस्था में ऐसे ही कई गाने होते हैं जो हम आसानी से शब्दों तथा धुनों को याद कर सकते हैं।

अगला कदम है ऐसे ही किसी खास गाने की रिकॉर्डिंग खोजना। यदि आपके पास वह नहीं है लेकिन आपके पास इंटरनेट है तो आप यू ट्यूबटीएम (www.youtube.com) पर जा सकते हैं तथा देखें कि वह वहां पर है वया? साथ ही आप अपनी स्थानीय लाइब्रेरी से भी खोज सकते हैं।

एक शांत स्थान पर बैठें तथा अपने चूने गए गानों को कई बार सुनें। इसमें कौसी आवाजें आती हैं? वया यह वही है जो आपको याद है? और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह आपको पसंद है या नहीं? आप इसकी आवाज के साथ यह देखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि वया आवाज की गुणवत्ता पर इसका वया प्रभाव पड़ता है? याद रखें कि संगीत सुनने का आपका अनुभव आपके अभ्यास के साथ ही बढ़ेगा। थोड़ा सा ध्यान शुरू में देकर आपको लंबी अवधि के लाभ हो सकते हैं।

यदि आपको गाने के बोलों के साथ समस्या आती है तो आप उनकी प्रति ह्रासिल करने का प्रयास करें। कभी कभी गीत की हमारी याद दाशत उतनी अच्छी नहीं होती है जितना हम सोचते हैं! गीतों के लिए इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। गाने का नाम टाइप करें या इसकी कुछ पंक्तियां गूगलटीएम (www.google.com) में डालें या किसी अन्य खोज इंजन में तथा देखें कि यह आपको पूरे गीत दे रहा है या नहीं।

## इसे सरल रखें

पहले अपनी पसंद के संगीत को सीमित रखना सीखें जिसमें बहुत ही साधारण क्रम हो तथा एक साफ समझ में आने वाली आवाज हो। उदाहरण के लिए कॉविलियर इम्प्लान्ट के कई उपयोगकर्ता यह रिपोर्ट करते हैं कि जॉनी कौश के शुरूआती गाने जैसे "I Walk the Line" तथा "Ring of Fire" बहुत ही सहज हैं तथा याद करने में सरल हैं। इन गानों की विशेषताएं जो इन्हें कॉविलियर इम्प्लान्ट के कई उपयोगकर्ताओं के लिए सरल बनाती हैं वे हैं कम वाद्यो का प्रयोग (कई बार तो केवल गिटार तथा तबला ही), एक सुस्पष्ट धुन, कौश की सुस्पष्ट आवाज तथा गाने का एक तरीका जो बातों को याद कराता है।

यदि आप वाद्यात्मक संगीत चाहते हैं तो ऐसे ही गानों को चुनें जिसमें या तो एक ही उपकरण हो या कई छोटे छोटे उपकरण हों। फिर से यू ट्यूब ही ऐसी जगह है जहां आप ये सब पा सकते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं उसका एक छोटा सा वितरण लिखें। जैसे 'केवल पियानो, पियानो व वायलिन, केवल गिटार आदि और देखें कि वया आता है। वया ऐसे गाने हैं जो आपको आते हैं? वया कोई संगीत प्रकार है जैसे ब्लू ग्रास, स्ट्रिंग बैंड, इंडी रॉक आदि? यदि हां तो इनका नाम डालें और देखें कि वया मिलता है।

## मनपसंद चलाना

आप जरूर ये देखना चाहेंगे कि यु. ट. यु. व क्या आपके पसंदीदा क्लिपि चलाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इल्विस प्रेस्ली है, एल्विस कॉस्टेलो या डर्फी है, आपको ये यहां पर मिल सकते हैं। उपलब्ध गानों में देखें तथा उन्हें चुनें। कुछ झलकियों में आपको गाने के बोल भी मिलेंगे जो कि गानों के लिए एक बहुत ही बड़ी मदद हो सकती है।

## सुनने संबंधी दृश्य

यु. ट. यु. व पर पाई जाने वाली सामग्री का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह न केवल आपको संगीत सुनने का अवसर देती है बल्कि यह आपको गाने को चलता हुआ भी दिखाता है। हम जानते हैं कि देखकर (बातों को पढ़ना) बातों को समझने में ज्यादा जरूरी होता है तथा इससे आपको संगीत भी बेहतर तरीके से सुना जा सकता है। एक गायक के होंठों को देखने से संगीत को समझने में मदद मिलती है तथा यह आपको संगीत को सुनने में बेहतर बनाती है। इसी प्रकार, कीबोर्ड पर एक पियानो वादन के हाथों को सुनकर आपकी श्रवण को मदद मिलती है क्योंकि इससे आपको वे सलाहें मिलती हैं जिसे आपको बेहतर तरीके से संगीत समझ आ जाता है।

## श्रवण वातावरण

रुकें तथा खुद से निम्न सवाल पूछें 'बातों को समझना कब सरल होता है?' कॉविलियर इम्प्लांट के अधिकतर उपयोगकर्ताओं का उत्तर होता है 'एक शांत तथा बिना शोरखुल के माहौल में'। संगीत के लिए भी यही लागू होता है। आपके पास संगीत को सुनने का बेहतर मौका तब होता है जब आप पृष्ठभूमि के शोर और बहुत ज्यादा बातचीत से दूरी बनाते हैं।

## उपकरण

यदि आपके पास यह है, तो याद रखें कि अच्छी गुणवत्ता वाला उपकरण ही आपको बेहतर श्रवण अनुभव देगा। जब तक आपके पास घर पर जो उपकरण मौजूद हैं उनकी जांच किए बिना नया उपकरण न खरीदें। यदि आपके ध्वनि की गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं दिख रही है तो सामान्य तरीके से सुनने वाले अपने परिवार के किसी सदस्य तथा दोस्त से इसे जांचने के लिए कहें। उन्हें इसकी आवाज कैसी लगती है? यदि वे भी मानते हैं कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है तो किसी अन्य उपकरण से सुनें तथा एक नया

उपकरण खरीदें। आई पॉड, एमपी3 प्लेयर, पोर्टेबल सीडी प्लेयर ये सभी लोकप्रिय हैं तथा आपके संगीत सुनने के बेहतर स्रोत हो सकते हैं, आपके माइक्रोफोन पर हैंडफोन को लगाकर, या आपके ऑडियो प्रोसेसर पर या सीधे ऑडियो इनपुट पर।

अगर आप अपने कंप्यूटर से सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसमें पहले से बने स्पीकरों की आवाज की गुणवत्ता बहुत ही खराब होती है। ध्यान दें कि आप बाहरी स्पीकर के सेट का प्रयोग करें, आपके माइक्रोफोन पर हैंडफोन को लगाकर, या आपके ऑडियो प्रोसेसर पर या सीधे ऑडियो इनपुट पर। फिर से यही विचार बढ़िया है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से आवाज की जांच करने के लिए कहें ताकि यह पता लग सके कि यह स्वीकार्य है।

अगर आप अपने कंप्यूटर से सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसमें पहले से बने स्पीकरों की आवाज की गुणवत्ता बहुत ही खराब होती है। ध्यान दें कि आप बाहरी स्पीकर के सेट का प्रयोग करें, आपके माइक्रोफोन पर हैंडफोन को लगाकर, या आपके ऑडियो प्रोसेसर पर या सीधे ऑडियो इनपुट पर। फिर से यही विचार बढ़िया है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त से आवाज की जांच करने के लिए कहें ताकि यह पता लग सके कि यह स्वीकार्य है।



MED-EL Medical Electronics  
Headquarters  
Fürstenweg 77a  
6020 Innsbruck, Austria  
office@medel.com

MED-EL India Private Ltd  
#505 Pragati House  
47-48 Nehru Place  
New Delhi, 110019 INDIA  
Ph. +91-11-41607171  
Fax. +91-11-41642800  
implants@medel.in

MED-EL GmbH Niederlassung Wien  
office@at.medel.com

MED-EL UK London Office  
office@medel.co.uk

MED-EL Thailand  
office@th.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH  
office@medel.de

MED-EL Corporation, USA  
implants@medelus.com

MED-EL Malaysia  
office@my.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH Büro Berlin  
office-berlin@medel.de

MED-EL Latino America S.R.L.  
medel@ar.medel.com

MED-EL Singapore  
office@sg.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH  
Office Helsinki  
office@fi.medel.com

MED-EL Colombia S.A.S.  
Office-Colombia@medel.com

MED-EL Indonesia  
office@id.medel.com

MED-EL Unità Locale Italiana  
ufficio.italia@medel.com

MED-EL Mexico  
Office-Mexico@medel.com

MED-EL Korea  
office@kr.medel.com

VIBRANT MED-EL France  
office@fr.medel.com

MED-EL Middle East FZE  
office@ae.medel.com

MED-EL Vietnam  
office@vn.medel.com

MED-EL BE  
office@be.medel.com

MED-EL India Private Ltd  
implants@medel.in

MED-EL Japan Co., Ltd  
office-japan@medel.com

MED-EL GmbH Sucursal España  
office@es.medel.com

MED-EL Hong Kong  
Asia Pacific Headquarters  
office@hk.medel.com

MED-EL Liaison Office  
Australasia  
office@au.medel.com

MED-EL GmbH Sucursal em Portugal  
office@pt.medel.com

MED-EL Philippines HQ  
office@ph.medel.com

MED-EL UK Ltd  
office@medel.co.uk

MED-EL China Office  
office@medel.net.cn

[www.medel.com](http://www.medel.com)