

MED  **EL**



Аудиопроцессор Samba

Краткое руководство

VAW52128_2.0 (Russian)



В данном кратком руководстве описаны основные способы обращения с аудиопроцессором Samba. Благодаря компактным размерам он легко помещается в карман и всегда под рукой.

Подробную информацию по назначению, показаниям, противопоказаниям, предупреждениям и мерам предосторожности при использовании аудиопроцессора Samba, а также полную информацию о его пульте дистанционного управления см. в Инструкции по эксплуатации Samba.


Содержание

Аудиопроцессор Samba	2
Замена батареи.....	3
Замена крышки.....	4
Использование заколки.....	5
Пульт дистанционного управления	6
Siemens miniTek.....	9
Батареи	10
Способы ухода за аудиопроцессором Samba.....	11
Поиск и устранение неисправностей	14

Аудиопроектор Samba




Замена батареи

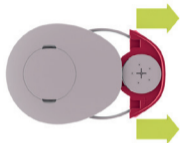

- 1 Зажмите аудиопроцессор Samba двумя пальцами. Сначала откройте одну сторону батарейного отсека, затем — другую.



- 2 Откройте батарейный отсек таким образом, чтобы батарея была полностью видна. Осторожно переверните Samba, чтобы батарея выпала сама.

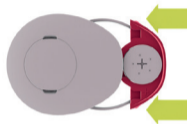


- 3 Возьмите новую батарею и снимите с нее покрытие из фольги. Поместите батарею в батарейный отсек аудиопроцессора. Вставьте батарейный отсек в аудиопроцессор.


Замена крышки



- 1** Извлеките батарею (см. стр. 3). Поместите Samba на ровную поверхность (например, стол) и положите палец на его крышку (a). Сначала поднимите одну сторону крышки (b), затем — другую (c).

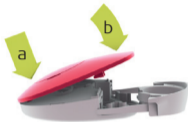

- 2** Снимите крышку полностью и поместите новую крышку на Samba. Надавите сначала на заднюю часть (a), затем — на переднюю (b). Вставьте батарею (см. стр. 3).

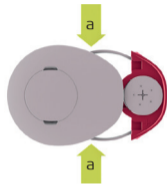


- 3** Сожмите стороны устройства непосредственно под крышкой и с тыльной стороны открытого батарейного отсека (a) так, чтобы крышка оказалась в правильном положении. Закройте батарейный отсек.

Использование закладки



- 1 Снимите крышку и извлеките батарею аудиопроцессора (см. стр. 3 и 4). Поместите крепежное ушко под батарейный отсек.

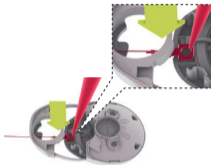


- 2 Вставьте крепежное ушко в маленькую прорезь под батарейным отсеком. Нажмите на ушко небольшим острым предметом.



- 3 Вставьте батарею и наденьте крышку (см. стр. 3 и 4). Закройте батарейный отсек.

Пульт дистанционного управления

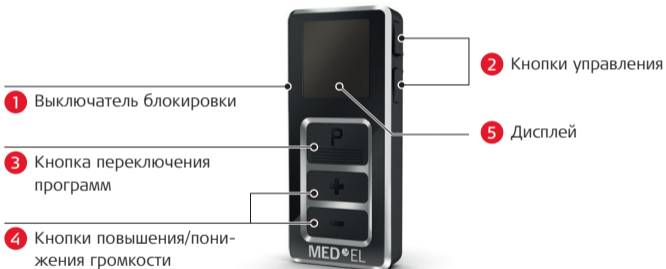

1 Выключатель блокировки
Во избежание случайного срабатывания пульта дистанционного управления в карманах и сумках переключите выключатель блокировки в положение блокировки (виден красный цвет).

2 Кнопки управления
Вы можете осуществлять быстрый доступ к двум функциям с помощью кнопок управления на правой стороне пульта дистанционного управления.



Включение или выключение слуховых устройств.




Сброс настроек громкости и программы на стандартные.

3 Кнопка переключения программ
Нажмите кнопку переключения программ, чтобы перейти к следующей программе. Если вы носите два слуховых устройства, программа переключается на двух устройствах одновременно.

4 Кнопки повышения/понижения громкости
Нажмите кнопку повышения или понижения громкости, чтобы отрегулировать громкость одним действием. Если вы носите два слуховых устройства, громкость регулируется на обоих устройствах одновременно.

5 Дисплей

Все действия, выполняемые с пульта дистанционного управления, немедленно отображаются на дисплее.

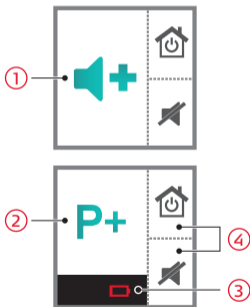

- ① Указывает на изменение уровня громкости
- ② Указывает на изменение программы
- ③ Разряжены батареи пульта дистанционного управления
- ④ Функции кнопок управления

Siemens miniTek



Альтернативное дистанционное управление
Беспроводное управление аудиопроцессором Samba может осуществляться с пульта Siemens miniTek*.

Подробная информация о пульте miniTek представлена в прилагаемом к нему Руководстве пользователя. Такое руководство пользователя предоставляется производителем соответствующего пульта дистанционного управления.

*Поддержка беспроводной связи посредством устройства Siemens miniTek (продается отдельно). Компания Sivantos не несет ответственности за эксплуатацию пульта совместно с Samba или его совместимость со стандартами безопасности и нормативными стандартами во время эксплуатации с Samba.

Батареи

Аудиопроцессор Samba: одна воздушно-цинковая батарея типоразмера 675

Время работы аудиопроцессора от батареи составляет примерно трое суток и зависит от выбранной программы, окружающей среды и продолжительности использования. Батарею следует менять регулярно, а также при резком ухудшении громкости звука. Если вы слышите серию гудков, это означает, что батарея разряжена и ее пора заменить.



Пульт дистанционного управления: две батареи AAA

Низкий уровень заряда батареи пульта дистанционного управления указывается в строке состояния.

Способы ухода за аудиопроцессором Samba

Соблюдение приведенных ниже важных инструкций поможет улучшить работу вашего аудиопроцессора Samba.

Чистка

Компания MED-EL рекомендует еженедельно чистить Samba из соображений гигиены. Проводите чистку только внешней поверхности устройства. Не погружайте Samba в воду и не подносите под струю воды. Аккуратно протирайте аудиопроцессор влажной тканью. При необходимости нанесите на ткань неабразивное хозяйственное мыло. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Хранение

Если Samba не используется, его следует хранить в футляре Samba из комплекта поставки. На время хранения из аудиопроцессора Samba можно извлечь батарею (или просто открыть крышку батарейного отсека), чтобы продлить срок службы батареи.

Контакт с водой

Следите, чтобы вода не затекла в Samba через отверстия микрофона или батарейный отсек.

Сушка

Если вы живете во влажном климате или обильно потеете, вместо футляра Samba храните неиспользуемый аудиопроцессор в контейнере-осушителе.

Солнечные лучи

Храните Samba в сухом месте и берегите от прямых солнечных лучей.

Более подробная информация о чистке, хранении, транспортировке и утилизации аудиопроцессора Samba, а также обслуживании пульта дистанционного управления представлена в Инструкции по эксплуатации.

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения незначительных технических проблем выполните указанные пошаговые инструкции для определения возможной причины и устранения проблемы.

- 1 Проверьте полярность батареи. Плоская сторона (+) должна быть сверху.
- 2 Проверьте, не разрядилась ли батарея и не требуется ли ее заменить.
- 3 Проверьте аудиопроцессор на наличие пыли или признаков повреждения. Аккуратно очистите все части процессора от грязи и протрите их насухо. Если какая-либо часть повреждена, обратитесь к представителю компании MED-EL.
- 4 Подробнее о поиске и устранении неисправностей см. Инструкцию по эксплуатации Samba.
- 5 Обратитесь к своему аудиологу и/или представителю компании MED-EL.

© MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, 2017. Версия 2.0 (03/2017). Все права защищены. Устройство Siemens miniTek производится компанией Sivantos GmbH по лицензии на товарный знак компании Siemens AG.





MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
vibrant@medel.com

medel.com

